

Olivia Newton-John weltweite Schirmherrin Das LivTastpad

Die Innovation in der Brustkrebs-Prävention

“Eine große Zahl von Frauen entdeckt den Brust-Krebs noch immer selber”, sagt die amerikanische Ikone der Brustkrebs-Prävention Olivia Newton-John. In Österreich und Deutschland stellt Olivia Newton-John eine neuartige **Tasthilfe** für die Selbstuntersuchung der Brust vor. Das LivTastpad macht den Selbstuntersuchungsprozess viel einfacher und angenehmer, da es die Reibung auf der Haut reduziert. Somit ist es eine enorme Hilfe bei der monatlich empfohlenen Selbstuntersuchung. **“Meine Vision ist es, dass jede Frau ein LivTastpad hat”**, so die aus Filmen wie Grease mit John Travolta bekannte Schauspielerin und Sängerin.

Brustkrebs ist in den westlichen Staaten der häufigste bösartige Tumor bei Frauen. An Brustkrebs sterben mehr Frauen als an irgendeiner anderen Krebserkrankung. Hierzulande ist Brustkrebs die häufigste Todesursache bei Frauen zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr. Allein in Deutschland erkranken jährlich mehr als 57.000 Frauen. 98% aller Frauen, bei denen Brustkrebs im 1. Stadium diagnostiziert wird, überleben. Das zeigt, wie wichtig Früherkennung ist.

Das Abtasten ist nach wie vor eines der zuverlässigsten Mittel zur Früherkennung. Rund 40% der Frauen ertasten ihre Knoten selbst. Das LivTastpad ist der erste Schritt zur einfachen Früherkennung. Zahlreiche, medizinische Erkenntnisse belegen die Vorteile des LivTastpads:

Das LivTastpad ist eine neuartige Tasthilfe zur Selbstuntersuchung, mit der Frauen ihre Brust abtasten und somit sicherstellen können, ihre Brustgesundheit durch das frühzeitige Erkennen etwaiger Veränderungen und die daraufhin einzuleitenden diagnostischen Maßnahmen zu erhalten. Das LivTastpad ermutigt Frauen, die Selbstuntersuchung zur Brustkrebsvorsorge regelmäßig und routinemäßig durchzuführen.

Das LivTastpad unterstützt Frauen in ihrer Selbstverantwortung. Die Mehrheit der Frauen weiß nicht, wann oder wie die Selbstuntersuchung zur Brustkrebsvorsorge zur Brustkrebsvorsorge durchzuführen ist. Das LivTastpad erinnert an die Selbstuntersuchung.

Das LivTastpad stärkt Frauen, einen aktiven Beitrag zur eigenen Gesundheit zu leisten und gibt ihnen die Kraft, unbesorgter auf ihre Gesundheit zu achten.

Hintergrund-Information

Olivia Newton-John erkrankte selber vor 16 Jahren an Brustkrebs und setzt sich seitdem für die Prävention ein. Aus ihrem Privatvermögen wendete die geborene Engländerin bislang über 10 Millionen Dollar für öffentliche Aktionen zur Brust-Krebsprävention auf. Im letztjährigen Internationalen Monat der Brustkrebs-Prävention verteilte sie mit dem Sponsor Curves 1 Million LivTastpads an Frauen in den USA.

Ganzjährig werden Sponsoren geworben, um möglichst breit das LivTastpad verteilen zu können. Frauen welche kein LivTastpad kostenlos bei Verteil-Aktionen erhalten, können diese flächendeckend in den **Apotheken** ab Oktober für einen Kosten-Beitrag von 19,75€ erhalten. Das LivTastpad ist hergestellt aus der von der Firma Bayer produzierten Dureflex-Folie, eine hochwertige technische Folie aus thermoplastischem Polyurethan. Das LivTastpad ist praktisch von unbegrenzter Lebensdauer. Somit stellt das LivTastpad ein demokratisches Element der Brustkrebs-Prävention dar, weil es kostenlos oder zu einem sehr geringen Kosten-Beitrag für jede Frau erschwinglich ist.

Die Verteilungs-Aktionen und der Vertrieb erfolgen durch die Firma Helvetic Medical Care GmbH, Seestrasse 15 in CH-6300 Zug. Ansprechpartner ist Geschäftsführer Alexander Rohringer unter der Telefonnummer: +41 41 566 94 10 oder +41 78 905 60 90. Weitere Informationen über das LivTastpad unter: www.liv-tastpad.ch oder auf unserer internationalen Seite: www.liv.com.



Anwendung des LivTastpads



Untersuchen Sie sich immer am selben Tag eines Monats, am besten eine Woche nach Ihrer Periode. Platzieren Sie Ihre Hände auf den Hüften und schauen Sie in den Spiegel. Stellen Sie irgendwelche Formveränderungen fest? Schwellungen? Bemerkten Sie Veränderungen der Haut, wie Grübchen, Falten oder Aussehen wie eine „Orangenschale“?



Anschließend halten Sie die Arme über den Kopf und schauen nach denselben Änderungen. Erscheint Ihnen alles normal?



Danach legen Sie sich flach hin (am besten mit einem kleinen Kissen unter ihrer rechten Schulter). Platzieren Sie ihren rechten Arm hinter ihren Kopf zur Stütze. Legen Sie jetzt das LivTastpad auf ihre rechte Brust. Lassen Sie die Finger ihrer linken Hand mit kreisenden Bewegungen über das LivTastpad gleiten, wobei sie leichten Druck ausüben. Wenn Sie den gesamten Bereich ihrer Brust, der durch das LivTastpad abgedeckt wird, untersucht haben, legen Sie es zum nächsten Bereich, bis die gesamte rechte Brust untersucht ist.

Sie sollten diese Untersuchung drei Mal durchführen, indem Sie nacheinander leichten, mittleren und größeren Druck ausüben. Nachdem Sie die gesamte rechte Brust mit verschiedenen Drücken untersucht haben, wiederholen Sie die selben Schritte bei Ihrer linken Brust mit der rechten Hand.

